


# Carrot 3

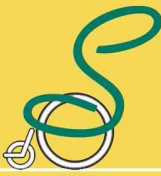

## Asiento de coche para niños

El asiento de coche Carrot 3 es el asiento más confortable para niños y jóvenes, que pueden empezar a usar desde los 2 años de edad aproximadamente.

### Asiento en forma de concha

El asiento en forma de concha proporciona un gran número de ventajas con un atractivo diseño. Carrot 3 proporciona soporte lateral a niños con control muscular reducido en cabeza, pecho, cadera y en la parte superior de las piernas. El cinturón de 5 puntos de anclaje, junto con el cojín pectoral sirven de ayuda adicional a la consecución de un posicionamiento óptimo. Gracias a los soportes de tronco y al taco abductor se obtiene un soporte adicional. Las pequeñas almohadillas grises de soporte pueden colocarse en cualquier parte del asiento, ya que se fijan con Velcro a la funda del mismo.



### Flexibilidad, crece con el niño

Durante el crecimiento del niño, tanto la profundidad del asiento como la altura del respaldo pueden incrementarse extraordinariamente hasta una altura de 160 cm. Los niños pequeños podrán apoyar sus pies y piernas en los accesorios acolchados. Si fuera necesaria la utilización de un reposapiés, disponemos de este accesorio con altura regulable que proporciona un soporte adicional. Carrot 3 es una silla incomparable por su flexibilidad que la permite crecer con el niño.

### Ligero

Carrot 3 pesa únicamente 8 kg, lo que resulta ser una ventaja cuando el asiento es trasladado frecuentemente de un coche a otro o a un chasis con ruedas.


### Características

Profundidad del asiento: 250-410 mm • Altura del respaldo: 520-770 mm • Altura del reposapiés: 250-460 mm • Peso del asiento: aproximadamente 8 kg • Peso del usuario: 10-50 kg.

Carrot 3 ha sido testado de acuerdo a la Directiva CEE R44/04 que establece pruebas para niños cuyo peso esté comprendido entre los 15 y 36 kg. (Modelos II y III), las cuales ha superado con éxito.

Carrot 3 ha sido diseñado para personas con discapacidad de entre 10 y 50 kg, por lo que también ha sido testado para estos pesos y también ha superado con éxito las pruebas. El marco legal de muchos países (como Alemania) permite el transporte de niños de entre 10 y 15 kg y de jóvenes pacientes entre 36 y 50 kg. En la mayoría de los países, necesitará una prescripción médica por escrito, en la cual se especifique la necesidad de utilización de este asiento para personas con un peso por debajo de los 15 o por encima de los 36 kg.

# Crecimiento modular

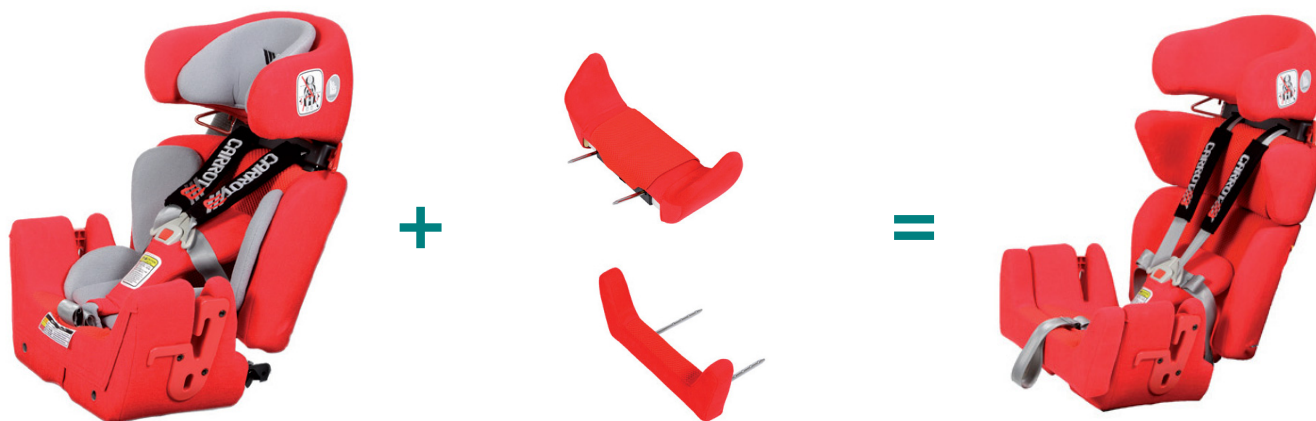


Carrot 3 S



Protector de hombros  
Extensión plana para rodillas

Carrot 3 L +  
Extensión plana para rodillas


## Medidas en mm

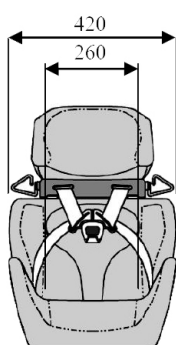

Carrot 3 S

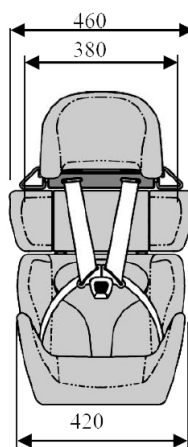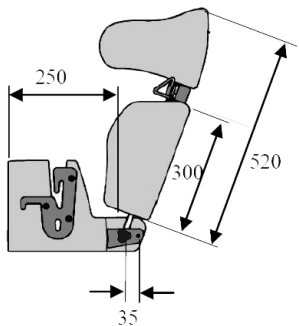

Carrot 3 L

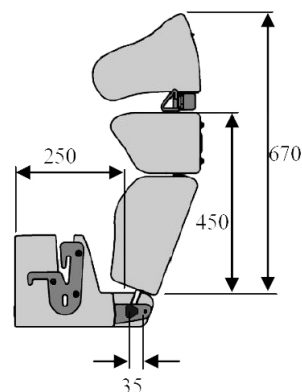

## Módulos de crecimiento



Extensión curvada para rodillas, larga



Extensión plana para rodillas, corta



Extensiones de asiento de 50 y 100 mm



Extensiones de respaldo (lumbar) de 50 y 100 mm

## Más opciones



Mesita reposabrazos



Cuña para inclinación de asiento tres tallas



Reposapiés graduables,



Taco abductor

# Cuando el niño crece – Carrot 3 crece también

## Ejemplos de configuraciones

### Carrot 3 S

(sin protector de hombros)



Con extensión curvada para rodillas larga. Profundidad real del asiento: 450 mm



Carrot 3 S con controles de tronco. Profundidad real del asiento: 250 mm



Con extensión plana para rodillas corta y extensión del respaldo de 50 mm. Profundidad real del asiento: 305 mm



Con extensión plana para rodillas corta, extensión del asiento de 50 mm y extensión del respaldo de 100 mm. Profundidad real del asiento: 360 mm

### Carrot 3 estándar

- Asiento con respaldo de altura regulable 100 mm.
- Cojines adicionales para asiento y respaldo.
- Dos controles de tronco acolchados adicionales.
- Todos los cojines se pueden fijar con Velcro a la funda.
- Cinturón de 5 puntos de anclaje con cierre automático.
- Protector acolchado para pecho.
- Guías para cinturón (derecha e izquierda).
- Fundas desmontables y lavables.
- Reposacabezas con profundidad ajustable.
- Asiento con profundidad ajustable 35 mm.

### Colores

- Azul.
- Negro.
- Rojo.

### Accesorios

- Extensión curvada para rodillas, larga.
- Extensión plana para rodillas, corta (50 mm).
- Extensión del asiento de 50 mm.
- Extensión del asiento de 100 mm.
- Cuña para inclinación del asiento.
- Tres tallas de reposapiés de altura regulable, con fijaciones de Velcro para las pantorrillas y los pies.
- Mesita reposabrazos.
- Taco abductor.
- Controles de tronco.
- ISO-Base (conexión Isofix).
- ISO-Turn (giratoria con conexión Isofix).
- Extensión del respaldo de 50 mm.
- Extensión del respaldo de 100 mm.
- Hebilla resistente.
- Hebilla de seguridad.

### Homologaciones

Directiva Europea CEE 044 04 para usuarios entre 15 y 36 kg. Probadada con éxito para usuarios entre 10 y 49 kg.

### Carrot 3 L

(sin protector de hombros)



Profundidad del asiento regulable hasta 35 mm. Profundidad real del asiento sin controles de tronco: 300 mm.



Con extensión plana para rodillas corta. Profundidad real del asiento: 355 mm.



Con extensión plana para rodillas corta y extensión del respaldo de 50 mm. Profundidad real del asiento: 355 mm.



Con extensión plana para rodillas corta, extensión del asiento de 50 mm y extensión del respaldo de 100 mm. Profundidad real del asiento: 410 mm.

# ISO-Base e ISO-Turn para Carrot 3

## ¿Cuál es la mejor manera de asegurar a mi hijo en el coche?

Muchos padres se plantean esta cuestión. Los tests estándar han demostrado que un asiento para coche sólido y robusto proporciona un buen soporte lateral. Pero la sujeción en caso de accidente se incrementa notablemente con ISOFIX.

## ¿Qué es ISOFIX?

ISOFIX es un sistema estándar internacional que proporciona una firme sujeción del asiento al vehículo. En los laterales del asiento para coche Carrot 3 se encuentran dos ganchos de acero modelo estándar adecuados para fijarse en las hebillas de acero del vehículo. Muchos fabricantes de coches instalan la conexión ISOFIX en sus vehículos desde hace años sin ningún tipo de recargo. En aquellos vehículos que no están equipados con el sistema ISOFIX, éste puede instalarse posteriormente. Los tests de colisión realizados, han demostrado que el soporte efectivo de las sillas para coches aumenta considerablemente con el sistema ISOFIX.

RehaNorm Bingen GmbH proporciona dos opciones de conexión con ISOFIX para Carrot 3:

- ISO-Base para la conexión entre el asiento del niño y el vehículo.
- ISO-Turn, además de lo anterior es giratoria.

Ambas han sido probadas para usuarios de hasta 50 kg de peso.

## Medidas

### ISO-Base:

L x W x H: 41.70 x 30.50 x 8.20 cm.

### ISO-Turn:

L x W x H: 50.50 x 40.00 x 48.00 cm.

Pedestal: 8 kg. 35.00 – 41.00 cm.

ISO-Turn puede utilizarse tanto en el lado derecho como en el izquierdo. Especificíquelo cuando haga su pedido.

## ISO-Base

Conecte las conexiones de acero del asiento para coche con las hebillas ISOFIX del vehículo. La plataforma amarilla, que puede ver en la imagen inferior, sirve para compensar la depresión central del asiento del vehículo.



## ISO-Turn

Permite girar Carrot 3 con el usuario un mínimo de 90° hasta 105°. Esto resulta muy útil cuando el tamaño y el peso del usuario hacen difícil el levantarlo dentro del coche. Además, la función de inclinación del respaldo sigue activa, ya que éste no se apoya directamente en el asiento del vehículo, sino en una columna que proporciona una estabilidad adicional y se sujeta la plataforma giratoria.



Reposapiés instalados en Carrot 3



Reposapiés instalados bajo ISO-Turn

DISTRIBUIDOR PARA ESPAÑA

Supace

ESCULTOR LLIMONA, 17 - 08031 BARCELONA

Tels. 93 357 04 27 - 93 357 02 68

Fax 93 357 02 68

[www.supace.com](http://www.supace.com)

[info@supace.com](mailto:info@supace.com)



Nos reservamos el derecho de modificación sin previo aviso