



x:pandaTM

x:panda es un asiento dinámico multi-ajustable fabricado en 4 tallas –cada asiento posee un ajuste de profundidad de al menos 10cm de ancho combinado con una extensión corredera en el respaldo.



El respaldo es dinámico, ya que permite al niño extenderlo y replegarlo con relativa poca resistencia siendo siempre posible retomar la posición de sedestación deseada. El respaldo es bloqueable si así se prefiere en el momento de la comida.

El respaldo se puede inclinar para que el niño se siente tanto con un ángulo de cadera abierto o cerrado.



16-46 cm



16-52 cm



27-68 cm



max 80 kg



Respaldos dinámicos

x:panda tiene un respaldo dinámico único que absorbe la energía de la extensión y devuelve al niño a su posición de sedestación erguida sin comprometer la posición pélvica



Multi-ajustable

La solapación de tallas significa que la opción de partida ofrece siempre el mayor potencial de crecimiento unido a un posicionamiento independiente de las piernas



Crecimiento

El crecimiento individual en anchura, profundidad y altura del respaldo alargan la vida del chasis y se acomoda a una gran gama de tallas de sillas existentes en el mercado



Respaldo

El punto de rotación (reclinación del respaldo) coincide con el eje de la cadera de manera que con el soporte del respaldo el niño se mantiene en la posición correcta y se ayuda a prevenir luxaciones de cadera



Talla

89101xx-01

Disponible en 4 tallas - cada talla tiene 3 anchuras



Es posible combinar diferentes
asientos con respaldos
distintos:

Asiento 1 con respaldo 2
Asiento 2 con respaldo 3
Asiento 3 con respaldo 4
Asiento 2 con respaldo 1
Asiento 3 con respaldo 2
Asiento 4 con respaldo 3

Anchura del asiento

La talla de cada asiento se puede fácilmente ajustar a tres anchuras
diferentes



Pequeño




Mediano




Grande

Cojín del respaldo

Disponible en pequeño, mediano, y grande. Se debe pedir por separado

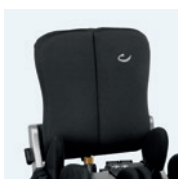

Negro = 60

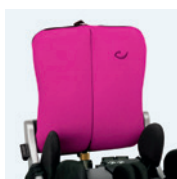

Rosado = 64 (No disponible para talla 4)



Rojo = 65



Azul = 66



Verde lima = 67

Cojín del asiento

Disponible en pequeño, mediano y grande. Se debe pedir por separado



Negro = 60



Rosado = 64 (No disponible para talla 4)



Rojo = 65



Azul = 66



Verde lima = 67


Cojín del asiento sin abducción

Disponible en pequeño, mediano y grande. Se debe pedir por separado



Negro = 60

Pistón de gas

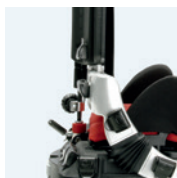

estándar



Accesorio

Talla de asiento 1+2 viene con un pistón de gas dinámico bloqueable de 100N


Talla de asiento 3 viene con un pistón de gas dinámico bloqueable de 150 N

Talla de asiento 4 viene con un pistón de gas dinámico bloqueable de 350 N

Pinzas de sujeción

El asiento que se entrega es el modelo estándar con ajustes de seguridad para el montaje de diversos chalecos y cinturones



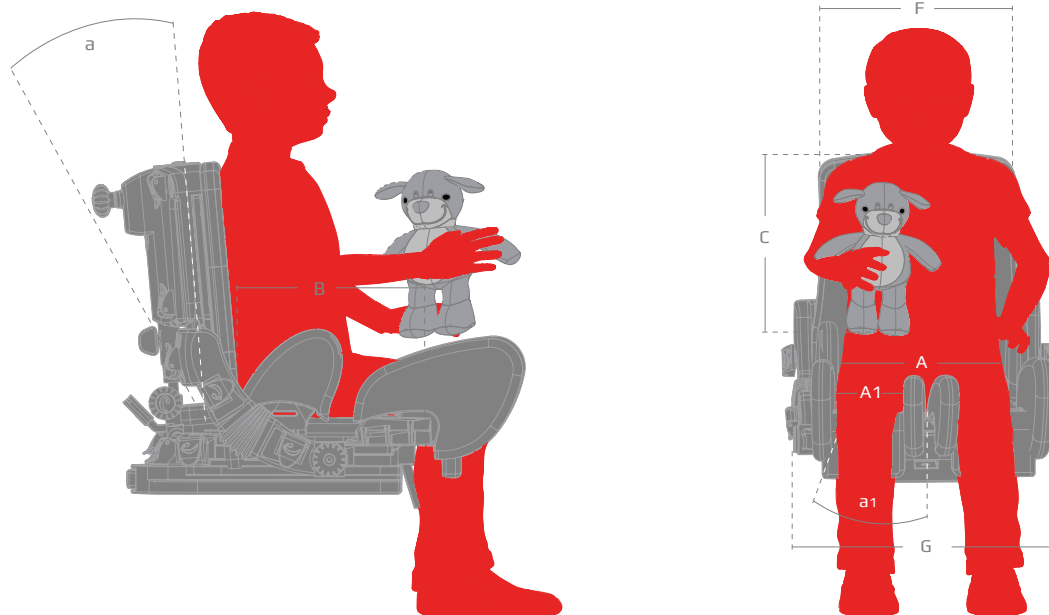

Medidas

	talla 1	talla 2	talla 3	talla 4
Ancho del asiento (A)	16, 20, 24 cm	20, 24, 28 cm	26, 31, 36 cm	34, 40, 46 cm
Ancho, muslos (A1)	7, 9, 11 cm	10, 12, 14 cm	12, 14½, 17 cm	13, 19, 25 cm
Profundidad del asiento (B)	16-26 cm	22-32 cm	26-39 cm	38-53 cm
Altura del respaldo (C)	27-37 cm	32-42 cm	35-47 cm	49-68 cm
Ancho del respaldo, superior (F)	23 cm	28 cm	33 cm	35 +5 cm
Ancho total, ambas piernas en abducción máxima (G)	31, 35, 39 cm	38, 42, 46 cm	47, 52, 57 cm	59, 65, 71 cm
Ángulo del respaldo (a)	-5° - +30°	-5° - +30°	-5° - +30°	-5° - +30°
Abducción del ángulo, por pierna (a1)	0° - 15° *	0° - 15°	0° - 15°	0° - 15°
* talla 1 en la posición mas pequeña	0° - 8°	-	-	-
Peso, asiento	6,5 kg	8,5 kg	11 kg	13 kg
Peso máximo del usuario	45 kg	50 kg	60 kg	80 kg
Peso máximo del usuario en vehículo	45 kg	50 kg	57 kg	57 kg

ACCESORIOS



Reposacabezas

99xxxxx-xx


Para una posición y soporte correcto

Véase la sección de accesorios al final del catálogo para más información sobre opciones y medidas



Pistón de gas no dinámico

891100x

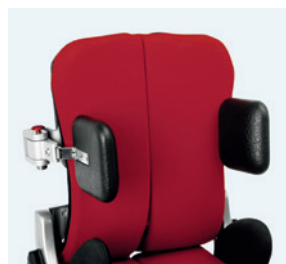


Controles de tronco pivotantes

839xx-xx

Para soporte adicional, se ajusta en altura y anchura

Véase la sección de accesorios al final del catálogo para más información sobre opciones y medidas

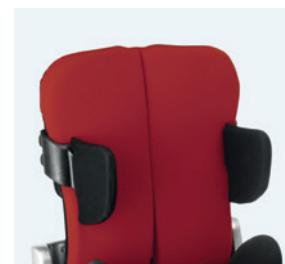


Controles de tronco

8910401-x, 8910401-xP

Se ajusta en altura y anchura

Tipo	Medidas
1	W:11 x H:7 cm
2	W:10 x H:10 cm
3	W:12 x H:14 cm
4	W:16 x H:9 cm
5	W:16 x H:15 cm
6	W:12 x H:14 cm

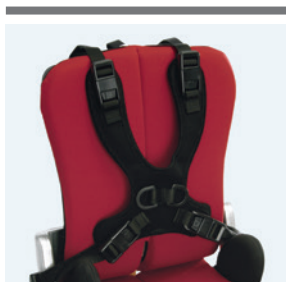


Chalecos y cinturones

89113-x

Existe una gama de posibilidades para un mayor soporte

Véase la sección de accesorios al final del catálogo para más información sobre opciones y medidas

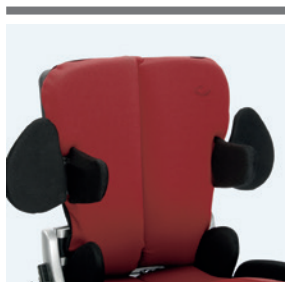

Soporte de brazos

Para soportar los antebrazos

Talla	Medidas
1	H:13½ x W:10 cm
2	H:19 x W:12½ cm




Extensiones de anchura para respaldo

8910409-45

Sólo para talla 4

Talla única

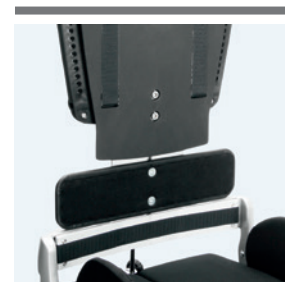

Placa adicional para el respaldo

8910406-4

Sólo para talla 4


Talla	Medidas
1	H:9 x W:35 cm



Mesa

891072x-x


Véase la sección de accesorios al final del catálogo para más información sobre opciones y medidas

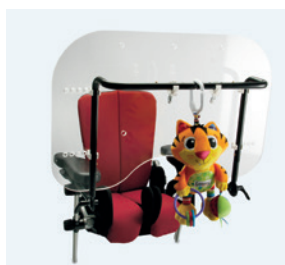

Mesa soporte para actividades

89250

Talla única

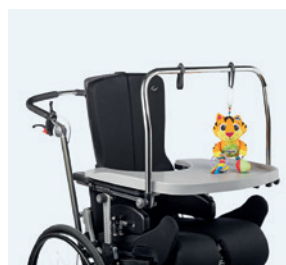

Barra para juguetes

8910740

Talla 1-3



Bloqueo rápido

8910702-x0

Para un ajuste rápido y fácil de los soportes laterales

Véase la sección de accesorios al final del catálogo para más información sobre opciones y medidas



ACCESORIOS




Pinzas de sujeción

8910260.

Situados por encima de la altura del respaldo para cuando se necesiten los cinturones

Talla única

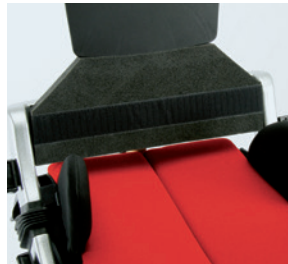

Almohadillado de espuma del respaldo

8910406-x.

Rellena el hueco entre el asiento y el respaldo

Talla	Medidas
1	W:21 x H:10 cm
2	W:25 x H:10 cm
3	W:30 x H:15 cm



Reposabrazos

891061x

Ajustable en altura y ángulo

Talla	Medidas
1	W:8 x L:23 x H:23 cm
2	W:8 x L:26 x H:28 cm
3	W:8 x L:29 x H:33 cm



Reposabrazos de doble barra

8910618

para x:panda talla 4

Talla	Medidas
4	W:8 x L:37 x H:19 cm
4	W:8 x L:37 x H:29 cm
4	W:8/12 x L:37xH:27 cm



Reposabrazos de barra única

8910619

para x:panda talla 4

Talla	Medidas
4	W:8 x L:37 x H:19 cm
4	W:8 x L:37 x H:29 cm
4	W:8/12 x L:37xH:27 cm



Cuñas para asiento

8910405-x

Talla	Medidas
1	W:6xL:16xH:2,5cm
1+2	W:8xL:16xH:2,5cm
1+2+3	W:10xL:16x:H:2,5cm
2+3	W:12xL:24,5xH:4cm
3	W:15xL:24,5xH:4cm



Cuñas para asiento

8910405-x

Proporciona control y posicionamiento

Talla	Medidas
4	W:13xL:30,5xH:5,5cm
4	W:15,5xL:30,5xH:5,5cm
4	W:19xL:30xH:5,5cm



Controles pélvicos

8910404-44 sólo para talla 4 con reposabrazos de doble barra. Ajusta el ancho del asiento corrigiendo la postura

Talla	Medidas
1	H:8,5 x W:19 cm



Capota plegable

SN67-9901

Talla única



Barra fija

891150x

Para fijar el respaldo a 90°

Tres tallas



Extensión para el respaldo

8910655-x60

Tres tallas

B:23 x H:10 x D:5 cm
B:28 x H:10 x D:5 cm
B:33 x H:10 x D:5 cm



Taco abductor

8910408-x

Evita la aducción de las piernas

