



respaldo y asientoTM en un cajón

Los cojines del respaldo y el asiento se entregan por separado y están fabricados para ajustarse a casi todos los usuarios.




Los cojines se pueden utilizar en todas las sillas de R82 pero son también fáciles de adaptar a otras. La funda, sin costuras incómodas o puntadas, le da el toque final. El sistema de cojines está diseñado para ser una solución "ya hecha" para el terapeuta que sólo tiene que concentrarse en su trabajo sacándole el máximo partido a un producto económico que combina la comodidad y el soporte que se puede esperar de R82. La forma de los cojines se adapta incluso a las necesidades posturales más extremas de algunos usuarios.

La funda es flexible, transpirable para su comodidad y resistente al agua para facilitar su limpieza lo que completa el paquete.



Cojín del respaldo

Ajuste el cojín del respaldo a las necesidades del usuario

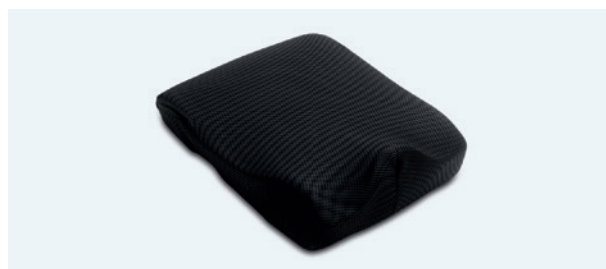


Cojín del asiento

Ajuste el cojín del asiento exactamente según las necesidades del usuario



Funda de asiento, para incontinencia

Por necesidades especiales, se puede pedir una funda de asiento para incontinencia como un accesorio

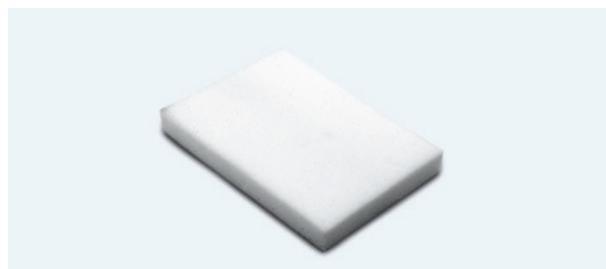

Material

La espuma se puede cortar a medida para proporcionar un soporte óptimo



Placa del respaldo

Cojín del respaldo, juego completo 97041-x



Placa del respaldo

Cuñas

Las diferentes cuñas se pueden cortar para que se adapten a las necesidades del usuario



Cuña del respaldo



Control de tronco
cuña



Soporte lumbar

Espuma



Placa del respaldo
T-espuma

Funda

La funda universal se ajusta a casi cualquier forma de cojín para respaldo



Funda de respaldo

Herramientas

La caja viene equipada con una cuchilla y una regla



Cuchilla & regla

Placas de asiento

Cojín del asiento, juego completo 97001-x



Placa del asiento

Cuñas

Las diferentes cuñas se pueden cortar para que se adapten a las necesidades del usuario



Lateral del asiento
derecho/izquierdo



Lateral del asiento
derecho/izquierdo



Frontal del asiento
perfil

Espuma


Los dos tipos de espuma proporcionan un confort óptimo en la sedestación



Placa del respaldo
T-espuma



Placa del asiento
Espuma

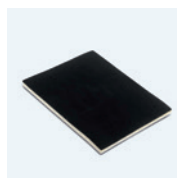

Parte superior
asiento, espuma



Taco abductor

Taco abductor

Añada el taco abductor si lo necesita

Funda

La funda universal se ajusta a casi cualquier forma de cojín para asiento



Funda de asiento

Herramientas


La caja viene equipada con una cuchilla y regla



Cuchilla & regla




Medidas

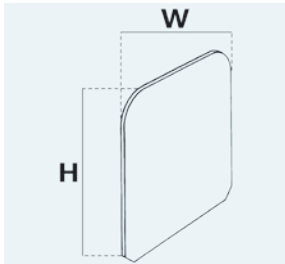

Placa base del respaldo

La placa base del respaldo es de 1 cm de grosor


Talla	Medidas
1	H:39 x W:27 cm
2	H:41 x W:31 cm
3	H:44 x W:35 cm
4	H:44 x W:39 cm

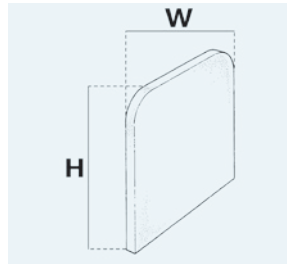

Cojín superior, T-espuma

El cojín superior es de 3 cm de grosor


Talla	Medidas
1	H:39 x W:37 cm
2	H:41 x W:41 cm
3	H:44 x W:45 cm
4	H:44 x W:49 cm

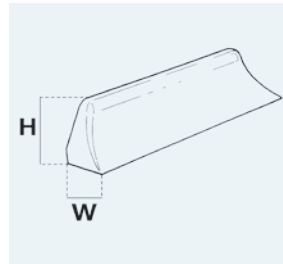

Cuña torax

La funda lateral es de 60 cm de largo


Talla	Medidas
1	H:9 x W:9 cm
2	H:9 x W:9 cm
3	H:11½ x W:10½ cm
4	H:11½ x W:10½ cm

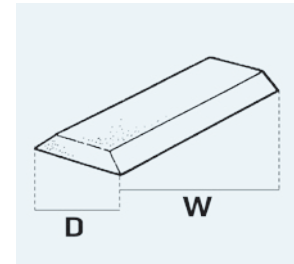

Soporte lumbar

El soporte lumbar es de 2cm de grosor


Talla	Medidas
1	D:9 x W:26 cm
2	D:9 x W:26 cm
3	D:11 x W:30½ cm
4	D:11 x W:30½ cm

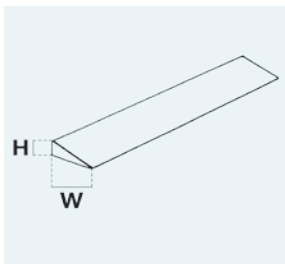

Cuña delgada

La funda es de 60 cm de largo


Talla	Medidas
1	H:3 x W:10 cm
2	H:3 x W:10 cm
3	H:3 x W:10 cm
4	H:3 x W:10 cm

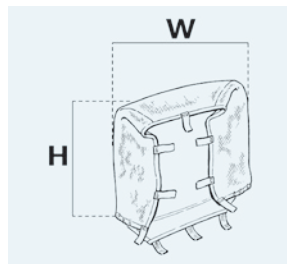

Funda del cojín del respaldo

Talla	Medidas
1	H:39 x W:37 cm
2	H:41 x W:41 cm
3	H:44 x W:45 cm
4	H:44 x W:49 cm


Medidas

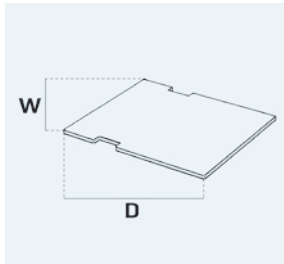

Placa base de asiento

La base del asiento es de 1 cm de grosor


Talla	Medidas
1	D:35½ x W:27½ cm
2	D:40 x W:31 cm
3	D:44 x W:35 cm
4	D:44 x W:39 cm

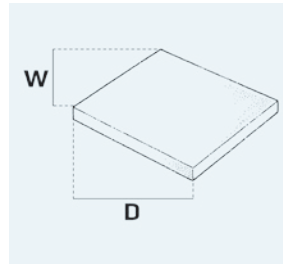

Cojín para asiento, T-espuma

El cojín del asiento es de 3 cm de grosor


Talla	Medidas
1	D:24 x W:18 cm
2	D:27 x W:21½ cm
3	D:30 x W:24 cm
4	D:30 x W:29½ cm

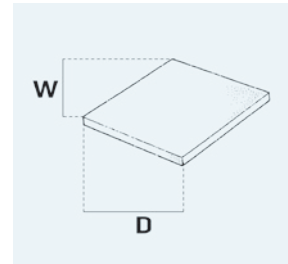

Cojín para asiento, espuma

El cojín para asiento es de 2 cm de grosor


Talla	Medidas
1	D:24 x W:18 cm
2	D:27 x W:21½ cm
3	D:30 x W:24 cm
4	D:30 x W:29½ cm

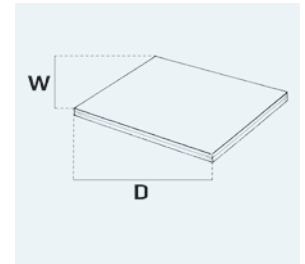

Placa superior del asiento, espuma

La placa superior del asiento es de 2 cm de grosor


Talla	Medidas
1	D:38 x W:30 cm
2	D:43 x W:34 cm
3	D:47 x W:38 cm
4	D:47 x W:42 cm

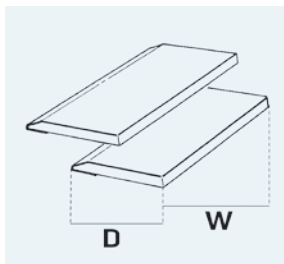

Perfil frontal del asiento

El perfil frontal del asiento es de 2 cm de grosor


Talla	Medidas
1	D:16½ x W:38½ cm
2	D:16½ x W:38½ cm
3	D:16½ x W:38½ cm
4	D:16½ x W:38½ cm

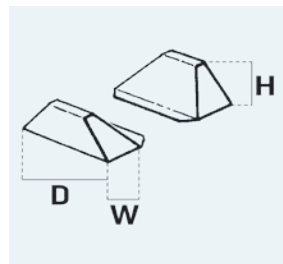

Perfiles frontales del asiento

Los perfiles se entregan en un juego de dos piezas y de un talla único


Talla	Medidas
único	H:5 x W:5 x D:13 cm

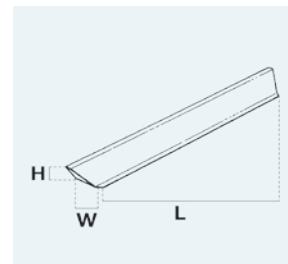

Perfil del lateral del asiento

El perfil del lateral del asiento es de un talla


Talla	Medidas
única	H:5 x W:5 x L:70 cm

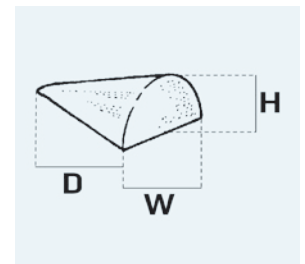

Taco abductor

El taco abductor es de un talla

Talla	Medidas
única	H: 7 x W:10 x D:12 cm

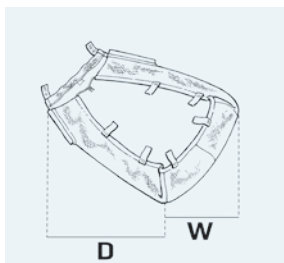

Funda del cojín del asiento

Talla	Medidas
1	D:38 x W:30 cm
2	D:43 x W:43 cm
3	D:47 x W:38 cm
4	D:47 x W:42 cm